

Vastuuvapauslauseke

Shaker Classic er ikke et leketøy. Dette produktet er bare konstruert til bruk for pustetrening. Noen andre bruksområder anbefales ikke.

Materialet i denne bruksanvisningen er bare til informasjon. POWERbreathe International Ltd gir ingen garantier når det gjelder denne bruksanvisningen eller produktene som er beskrevet her. Det fremsettes ikke noen løfter, de er heller ikke underforstått, om bruken eller resultater ved bruk av utstyret i denne beskrivelsen. POWERbreathe International skal ikke holdes ansvarlig for noen skader, direkte eller tilfældige, følgeskader eller spesielle som måtte komme av bruken av dette materialet eller produktene som er beskrevet her.

Shaker Classic er et patentert og designbeskyttet produkt. Alle rettigheter forbeholdes. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel fordi produsenten hele tiden gjennomfører programutvikling.

POWERbreathes logo er et registrert varemerke for POWERbreathe Holdings Ltd. Alle POWERbreathes produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for POWERbreathe Holdings Ltd. E & OE © 12/2017.

Begrenset 12 måneders produsentgaranti:

Shaker Classic er produsert eksklusivt for Powerbreathe International Ltd for internasjonal distribusjon. Denne garantien gir kunden spesifikke juridiske rettigheter. Kunden kan også ha andre forskriftsmessige rettigheter. Powerbreathe International Ltd garanterer med dette til den opprinnelige kjøperen, hvis navn tilberlig er registrert med produktet, at produktet som er solgt er fritt for defekter i materiell og arbeidsutførelse.

Forpliktelsene til POWERbreathe International Ltd under denne garantien er begrenset til reparasjon og utskiftning av slik del eller deler av apparatet, etter som det blir funnet ved inspeksjon at det er defekt i materiale eller arbeidsutførelse. Feil bruk, misbruk eller ulykker, uaktsomhet i forhold til forholdsreglene, feil vedlikehold eller kommersiell bruk, sprukket eller knuste esker dekkes ikke av denne garantien. I løpet av garantiperioden på ett år vil

Hva er Shaker Classic?

Shaker Classic er en lettbrukt åndedrettsenhet for mobilisering av lungesekret som slim og katarr.

Hvordan virker Shaker Classic?

Inne i huset til Shaker Classic er det en tung ball. Ved å puste inn i Shaker Classic heves ballen, som deretter faller av sin egen vekt. Denne heve- og senkehandlingen skjer ekstremt hurtig og for brukeren føles det som en vibrasjon. Denne vibrasjonen, kombinert med den lette motstanden som skapes av å puste mot ballen, forårsaker en rekke positive fordeler. Endringer i lufttrykk betyr at de mindre luftveiene stimuleres til å åpne seg og øker lungenes bruk og effektivitet. Slim fortynnes eller drives bort av vibrasjonen og økt luftstrøm bidrar til å flytte dette slimet til de store luftveiene hvor forsiktig hosting kan støte det ut.

Shaker Classic kan brukes overalt og gir enkel og behagelig lindring fra slim og tilknyttede problemer. Shaker Classic kan brukes for kroniske tilstander som KOLS, astma, emfysem og akutte problemer slik som hoste, influensa og bronkitt. Ved å rense luftveiene reduseres faren for å utvikle lungeinfeksjon og skade på lungene. Lungefunksjonen forbedres også, noe som reduserer tungpustethet og utmattelse.

Hvordan bruke Shaker Classic

Sitt eller ligg ned, legg leppene dine tett rundt munnstykket. Påse at munnstykket befinner seg i horisontal stilling.

Pust inn gjennom nesen og pust ut gjennom munnen.

Plasser enheten slik at den skaper maksimal vibrasjon i lungene, noe du kjenner ved å plassere hånden på brystet når du puster ut.

Host forsiktig og støt ut sekret jevnlig eller ved behov.

produktet enten bli reparert eller skiftes ut (etter vårt valg, kostnadsfritt). Denne garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av uttørt service som ikke er autorisert av POWERbreathe International Ltd.

Garantiene som fremstilles i dette dokumentet erstatter alle andre garantier, inkludert underforstått garanti om omsettelighet og/eller egnethet for formålet.

Kontaktinformasjon

Hovedkontor
POWERbreathe International Ltd
Northfield Road, Southam, Warwickshire
CV47 0FG, England, UK
www.powerbreathe.com
Telefon: +44 (0) 1926 816100

Laget i Brasil utelukkende for POWERbreathe International Ltd
Dette produktet er beskyttet av patent og design copyright©



EC REP POWERbreathe International Ltd

E & OE © 06/2020 JN.4066 V2

NO

Forholdsregler

- Shaker Classic er en enhet for en enkelt bruker og av hygieniske årsaker må den ikke deles med andre brukere.
- Shaker Classic må ikke brukes av personer med pneumotoraks.
- Personer med alvorlig hjerte- og karsykdom må kun bruke Shaker Classic etter råd fra lege.
- Ikke endre inntak/bruk av noen forordnet medisin eller behandlingsprogram uten å konsultere med legen din.
- Når enheten brukes av barn under 16 år kan det være nødvendig med oppsyn av en voksen.
- Hvis du blir svimmel mens du bruker Shaker Classic bør du avslutte øvelsen og puste rolig gjennom nesen til følelsen gir seg. Hvis du blir svimmel hver gang du bruker Shaker Classic bør du puste inn og ut uten Shaker Classic hvert tredje pust. Hvis svimmelheten vedvarer, eller hvis det oppstår andre problemer under bruk av Shaker Classic, avslutt bruk av enheten umiddelbart og kontakt legen din.
- Shaker Classic er konstruert for mobilisering av lungesekreter. Ingen andre bruksområder er tiltenkt eller underforstått. Dette produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle, lege eller forhindre noen sykdom.
- Kun enheter som er solgt i forseglede pakning skal brukes.
- Oppbevar på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte varme og sollys.
- Dette produktet er forseglede av hygienemessige årsaker, og kan ikke leveres tilbake hvis forseglingen er brutt.

Tekniske spesifikasjoner

Hoveddel, kjegle og munnstykke er alle produsert av injisert polyamid. Den tunge ballen er av forniklet stål.




Bruksanvisning



Stell og vedlikehold

Fordi din Shaker Classic utsettes for spytt under bruk anbefaler vi at den rengjøres etter bruk. Fjern munnstykket, skru av dekelet og fjern ballen og den indre kjeglen. Vask alle delene i såpevann, skyll med rent vann, tørk grundig og monter igjen. Vi anbefaler at enheten en gang i uken rengjøres med godkjente rensetabletter.

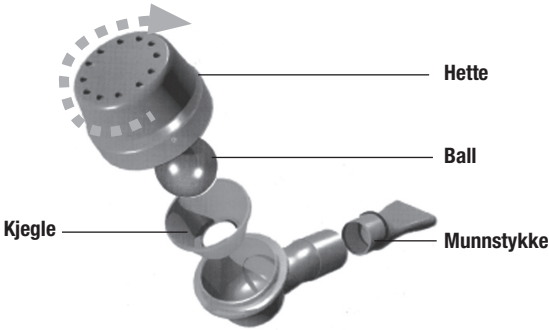

Hva er Shaker Classic?

Shaker Classic er en lettbrukt åndedrettsenhet for mobilisering av lungesekret som slim og katarr.

Hvordan virker Shaker Classic?

Inne i huset til Shaker Classic er det en tung ball. Ved å puste inn i Shaker Classic heves ballen, som deretter faller av sin egen vekt. Denne heve- og senkehandlingen skjer ekstremt hurtig og for brukeren føles det som en vibrasjon. Denne vibrasjonen, kombinert med den lette motstanden som skapes av å puste mot ballen, forårsaker en rekke positive fordeler. Endringer i lufttrykk betyr at de mindre luftveiene stimuleres til å åpne seg og øker lungenes bruk og effektivitet. Slim fortynnes eller drives bort av vibrasjonen og økt luftstrøm bidrar til å flytte dette slimet til de store luftveiene hvor forsiktig hosting kan støte det ut.

Shaker Classic kan brukes overalt og gir enkel og behagelig lindring fra slim og tilknyttede problemer. Shaker Classic kan brukes for kroniske tilstander som KOLS, astma, emfysem og akutte problemer slik som hoste, influensa og bronkitt. Ved å rense luftveiene reduseres faren for å utvikle lungeinfeksjon og skade på lungene. Lungefunksjonen forbedres også, noe som reduserer tungpustethet og utmattelse.

Hvordan bruke Shaker Classic

Sitt eller ligg ned, legg leppene dine tett rundt munnstykket. Påse at munnstykket befinner seg i horisontal stilling.

Pust inn gjennom nesen og pust ut gjennom munnen.

Plasser enheten slik at den skaper maksimal vibrasjon i lungene, noe du kjenner ved å plassere hånden på brystet når du puster ut.

Host forsiktig og støt ut sekret jevnlig eller ved behov.

Vastuuvapauslauseke

Shaker Classic er ikke et leketøy. Dette produktet er bare konstruert til bruk for pustetrening. Noen andre bruksområder anbefales ikke.

Materialet i denne bruksanvisningen er bare til informasjon. POWERbreathe International Ltd gir ingen garantier når det gjelder denne bruksanvisningen eller produktene som er beskrevet her. Det fremsettes ikke noen løfter, de er heller ikke underforstått, om bruken eller resultater ved bruk av utstyret i denne beskrivelsen. POWERbreathe International skal ikke holdes ansvarlig for noen skader, direkte eller tilfeldige, følgeskader eller spesielle som måtte komme av bruken av dette materialet eller produktene som er beskrevet her.

Shaker Classic er et patentert og designbeskyttet produkt. Alle rettigheter forbeholdes. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel fordi produsenten hele tiden gjennomfører programutvikling.

POWERbreathes logo er et registrert varemerke for POWERbreathe Holdings Ltd. Alle POWERbreathes produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for POWERbreathe Holdings Ltd. E & OE © 12/2017.

Begrenset 12 måneders produsentgaranti:

Shaker Classic er produsert eksklusivt for Powerbreathe International Ltd for internasjonal distribusjon. Denne garantien gir kunden spesifikke juridiske rettigheter. Kunden kan også ha andre forskriftsmessige rettigheter. Powerbreathe International Ltd garanterer med dette til den opprinnelige kjøperen, hvis navn tilhører er registrert med produktet, at produktet som er solgt er fritt for defekter i materiell og arbeidsutførelse.

Forpliktelsene til POWERbreathe International Ltd under denne garantien er begrenset til reparasjon og utskiftning av slik del eller deler av apparatet, etter som det blir funnet ved inspeksjon at det er defekt i materiale eller arbeidsutførelse. Feil bruk, misbruk eller ulykker, uaktsomhet i forhold til forholdsreglene, feil vedlikehold eller kommersiell bruk, sprukket eller knuste esker dekkes ikke av denne garantien. I løpet av garantiperioden på ett år vil

Forholdsregler

- Shaker Classic er en enhet for en enkelt bruker og av hygieniske årsaker må den ikke deles med andre brukere.
- Shaker Classic må ikke brukes av personer med pneumotoraks.
- Personer med alvorlig hjerte- og karsykdom må kun bruke Shaker Classic etter råd fra lege.
- Ikke endre inntak/bruk av noen forordnet medisin eller behandlingsprogram uten å konsultere med legen din.
- Når enheten brukes av barn under 16 år kan det være nødvendig med oppsyn av en voksen.
- Hvis du blir svimmel mens du bruker Shaker Classic bør du avslutte øvelsen og puste rolig gjennom nesen til følelsen gir seg. Hvis du blir svimmel hver gang du bruker Shaker Classic bør du puste inn og ut uten Shaker Classic hvert tredje pust. Hvis svimmelheten vedvarer, eller hvis det oppstår andre problemer under bruk av Shaker Classic, avslutt bruk av enheten umiddelbart og kontakt legen din.
- Shaker Classic er konstruert for mobilisering av lungesekreter. Ingen andre bruksområder er tiltenkt eller underforstått. Dette produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle, lege eller forhindre noen sykdom.
- Kun enheter som er solgt i forseglet pakning skal brukes.
- Oppbevar på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte varme og sollys.
- Dette produktet er forseglet av hygienemessige årsaker, og kan ikke leveres tilbake hvis forseglingen er brutt.

Tekniske spesifikasjoner

Hoveddel, kjegle og munnstykke er alle produsert av injisert polyamid. Den tunge ballen er av forniklet stål.

produktet enten bli reparert eller skiftes ut (etter vårt valg, kostnadsfritt). Denne garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av utført service som ikke er autorisert av POWERbreathe International Ltd.

Garantiene som fremstilles i dette dokumentet erstatter alle andre garantier, inkludert underforstått garanti om omsettelighet og/eller egnethet for formålet.

Kontaktinformasjon

Hovedkontor
POWERbreathe International Ltd
Northfield Road, Southam, Warwickshire
CV47 0FG, England, UK
www.powerbreathe.com
Telefon: +44 (0) 1926 816100

Laget i Brasil utelukkende for POWERbreathe International Ltd
Dette produktet er beskyttet av patent og design copyright©




EC REP POWERbreathe International Ltd

E & OE © 06/2020 JN.4066 V2



Stell og vedlikehold

Fordi din Shaker Classic utsettes for spytt under bruk anbefaler vi at den rengjøres etter bruk. Fjern munnstykket, skru av dekelet og fjern ballen og den indre kjeglen. Vask alle delene i såpevann, skyll med rent vann, tørk grundig og monter igjen. Vi anbefaler at enheten en gang i uken rengjøres med godkjente rensetabletter.

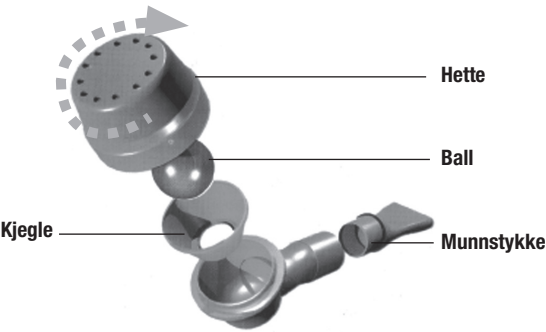

Bruksanvisning

